

Guide d'utilisation

Confectionnées avec un tissu tissé en coton (Faso Danfani), les serviettes hygiéniques Palobdé sont douces, absorbantes et confortables. Elles sont lavables, réutilisables et contiennent une couche imperméable permettant d'éviter les fuites. S'adaptant à tout type de flux, elles peuvent être utilisées pendant au moins deux ans.

Chaque Kit Palobdé contient :

- ▶ 3 serviettes
- ▶ 4 inserts
- ▶ 1 sachet lavable pour recueillir les serviettes utilisées
- ▶ 1 sachet plastique transparent
- ▶ 1 guide d'utilisation (texte et images)
- ▶ 1 calendrier de suivi des règles
- ▶ 1 sac en tissu (36x28 cm) pour emballage
- ▶ Une boule de savon Citec N°2

Instructions

1. Ouvrir le kit et retirer une serviette ;
2. Tenir la serviette avec les languettes orientées vers le haut ;
3. Ouvrir la serviette, retirez l'insert ;
4. Retournez la serviette ;
5. Insérez chaque extrémité de l'insert sous les rubans et ajustez ;
6. Posez la serviette sur votre slip et fermez les languettes en appuyant sur les pressions ;
7. Changez l'insert ou la serviette toutes les 3 ou 4 heures ou selon le besoin. Au cas échéant, placer les serviettes et les inserts utilisés dans le sachet imperméable prévu à cet effet et laver vos mains à l'eau propre ;
8. Laver les serviettes, les inserts et le sachet utilisés à l'eau propre et froide pour maintenir la durée de vie. Utiliser du savon de lessive et non un détergent
9. Faire sécher de préférence vos serviettes au soleil et repassez si possible, sans les brûler
10. Avant de les porter, assurez-vous qu'elles soient bien sèches.

Recommandation : Lavez vos serviettes hygiéniques Palobdé avant la première utilisation !

Etapes à suivre pour utiliser convenablement les serviettes hygiéniques PALOBDE

